

Kaltplasma-Therapie

[medicops.net](https://www.medicops.net)



medicops
GEMEINSAM MEHR ERREICHEN



**QUICK-
GUIDE**

Abtötung multiresistenter Keime

Aktivierung der Wundheilung

Delegierbar

Geeignet für Patienten mit
Herz unterstützenden
Systemen

Keine Allergien

Keine
Entwicklung
von Resistenzen

Effektive Bakterienreduktion



Der Quick-Guide ersetzt nicht das Lesen der Gebrauchsanweisung.

Bestandteile:

- | | |
|--|---|
| 1. meco Plasma Care | 2. meco Plasma Care Wound-Spacer |
| - 1x Handgerät (mit austauschbarer Plasmaquelle) | (steriler Abstandshalter - Verbrauchsartikel ist nicht Bestandteil des Koffers) |
| - 1x Trainings-Spacer | |
| - 1x Docking-Station | |
| - 1x Netzteil | |
| - 1x Gebrauchsanweisung | |

Warnhinweise:

- Das meco Plasma Care Handgerät ist stoßempfindlich.
- Der meco Plasma Care Wound-Spacer darf während einer Behandlung nicht vom Gerät getrennt werden, da ansonsten die Behandlungseinheit abgebrochen wird.

Anwendung:

Schritt 1:

Die Verpackung des meco Plasma Care Wound-Spacers (Abstandshalter) öffnen - den Wound-Spacer nicht entnehmen.

Schritt 2:

Das meco Plasma Care Handgerät einschalten. Hierfür die mittige Touchfläche kurz berühren, bis ein weißes Licht aufleuchtet.

Schritt 3:

Das meco Plasma Care Handgerät in die eine Hand nehmen und die Verpackung mit dem enthaltenen Wound-Spacer in die andere Hand nehmen, sodass die abstehende Lasche des Wound-Spacers nach oben zeigt. Den Gerätekopf nun in den Wound-Spacer drücken. Es sollte ein Piepton zu hören sein und ein blaues Licht aufblinken.

Schritt 4:

Sobald der Piepton erlischt und das blaue Licht dauerhaft leuchtet, ist das Gerät bereit für die Behandlung. Den Gerätekopf nun zu der zu behandelnden Wunde bewegen, sodass der Wound-Spacer nach Möglichkeit auf der Wunde aufliegt.

Schritt 5:

Um die Behandlung zu starten, muss die Touchfläche einmal kurz berührt werden, sodass die erste Leuchte zu blinken beginnt.

Die Anwendung dauert 60 Sekunden und ist nach vollständigem Erlöschen des blauen Lichts beendet.

Bei größeren Wunden kann die Position des Wound-Spacers nun verändert werden und durch kurzes Berühren der Touchfläche eine weitere Anwendung für 60 Sekunden gestartet werden. Die Anwendung kann mit einem Wound-Spacer bis zu sechs Mal wiederholt werden. Nach sechs Anwendungen oder einem Behandlungszeitfenster von 10 Minuten blinkt das Gerät rot und die Behandlung ist beendet.

Schritt 6:

Sobald Sie mit der vollständigen Behandlung fertig sind, schalten Sie das Gerät aus. Halten Sie dafür die Touchfläche für 3 Sekunden gedrückt. Der Wound-Spacer kann vom Gerätekopf entfernt und anschließend entsorgt werden.